

Durée d'usage de solutions de produits désinfectants et nettoyants concentrés STAMMOPUR DR 8, STAMMOPUR DR 2 et STAMMOPUR DR

La durée d'usage d'une solution fraîchement préparée et inutilisée s'élève à 7 jours, 14 jours pour STAMMOPUR DR 8.

La durée d'usage d'une solution qui a déjà servi, dépend de sa sollicitation. Le degré de sollicitation d'une solution utilitaire est différent et ne peut pas être standardisé. Pour des raisons de sécurité, il faudra exécuter quotidiennement une nouvelle formulation en accord avec les citations suivantes :

Selon les exigences contenues dans les directives relatives à l'hygiène dans les hôpitaux et la prévention des infections¹,

„... à chaque fois il faut utiliser une solution de désinfection fraîchement préparée.“

La signification du terme „solution de désinfection fraîchement préparée“ est précisée dans l'article du journal fédéral sur la santé² :

„... une solution de désinfection fraîche veut dire que cette solution doit être remplacée quotidiennement...“.

Pour STAMMOPUR DR 8, la durée d'usage de la solution déjà utilisée avec sollicitation s'élève à 3 jours³ comme justifiée par expertise.

Il faut préparer les solutions utilitaires avec de l'eau froide. Ne pas les réchauffer ultérieurement. La coagulation protéinique qui entrave considérablement la désinfection et le nettoyage, commence à partir d'une température de 40 °C.

Pour des températures plus élevées un dégagement de vapeurs dangereuses pour la santé peut avoir lieu.

L'étiquette fournit la durabilité des produits à l'état concentré.

Elle s'élève à 3 années après fabrication.

¹ „Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ (directive pour l'hygiène en hôpitaux et la prévention des infections), Éd. Robert Koch-Institut, Version de décembre 1996, chiffre 7.2. (3.2.2).

² „Bundesgesundheitsblatt“ (journal fédéral sur la santé) (1991) 34, 262.

³ expertise : Prof. Dr. Werner, 10/1999, Schwerin